

	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Dibuat Ka. Sub Unit Laboreatorium	Disahkan Kaprosdi D3 Kebidanan Blora
	PERAWATAN ALAT DARI BAHAN BAKU KAIN			
SUB UNIT LAB PRODI KEBIDANAN BLORA	Tanggal 07-08-2023	Halaman Hal 1 dari 1	Ristiana, SST.	Elisa Ulfiana, S.SiT., M.Kes

1. **PENGERTIAN** Merawat peralatan yang terbuat dari bahan kain misalnya doek, laken, baju operasi dan lain-lain.
2. **TUJUAN** Mencegah kerusakan alat
3. **INDIKASI** Sebelum dan sesudah pemakaian peralatan
4. **PETUGAS** Laboran
 1. Air bersih
 2. Waskom
 3. Detergent
 4. Penjemur pakaian
5. **PERALATAN**

Tahap Kerja

 1. Membersihkan kotoran darah atau cairan sebelum melakukan penyimpanan.
 2. Rendam alat dari kain dengan detergent, Cuci dengan detergent kemudian dikeringkan/dijemur dibawah sinar matahari, setelah kering lipat dan simpan di lemari yang kering dan bersih.
 3. Jika alat dari kain akan disterilkan, sterilkan alat dari kain dengan menggunakan autoclave.
6. **PROSEDUR PELAKSANAAN**